

この説明書をよく読んでから使用してください。

- ** 2023年06月（第3版）
* 2021年01月（第2版）

電解質洗浄液 2

【一般的な注意】

- ア. 本製品は常光製電解質分析装置専用コンディショニング液（洗浄剤）です。それ以外の目的に使用しないでください。
- イ. 本書以外の使用方法については保証をいたしません。
- ウ. 使用する機器の添付文書および取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- * エ. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断を行ってください。
- * オ. 必ず冷暗所（2～8℃）にて保管してください。（輸送時：35℃以下、7日以内）。
開封後は付属のアルミパウチ内に点眼瓶を入れ、ジップをしっかりと閉じて必ず冷暗所（2～8℃）にて保管してください。

【形状・構造等（キットの構成）】

- **（1）組成（法令対象物質のみ記載）

化学名	含有量
次亜塩素酸ナトリウム	0.12 %

- *（2）専用コンディショニング液 表示値はありません。

【使用目的】

常光製電解質分析装置におけるコンディショニング液（洗浄剤）として使用します。

【測定原理】

溶液中に含まれる洗浄成分の作用で電極及び流路を洗浄します。

【用法・容量（操作方法）】

- （1）用法
- ア. 装置の所定の位置に取り付けサンプルカップから吸引させて使用します。
- イ. 洗浄の時期 その日の検体を測定終了後に吸引します。
- *（2）容量
- ア. 25 mL / 点眼瓶
- （3）操作方法
- ア. 装置付属の取扱説明書を参照してください。

* 【性能】

正確性

本品自体が、感度、正確性、同時再現性を有するものではありません。

** 【使用上又は取扱い上の注意】

- **（1）使用上の注意
- ア. 本品は凍結を避け、貯法に従って保存してください。
- イ. 使用期限が切れた試薬は使用しないでください。
- ウ. 機器の使用温度で使用してください。
- エ. 労働安全衛生法に基づく表示

GHS 分類：皮膚腐食性／刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2A
水生環境有害性（慢性）区分2

絵表示：



注意喚起語：警告

※注意事項

- ア. 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
- イ. 取扱い後は、手洗いを十分に行ってください。
- ウ. 環境へ放出しないでください。
- エ. 少量の製品が目に入った場合、直ちに清浄な流水で15分以上洗浄し、眼の刺激が続く場合は、眼科医の手当を受けてください。
- オ. 皮膚に付着した場合は、多量の水と石鹸で患部を洗浄し、刺激を感じる場合は、医師の治療を受けてください。
- カ. こぼれた場合は、ウェス等で拭き取ってください。
- **（2）取り扱い上の注意
- ア. 使用時、装置内に試料又は試薬をこぼさないようにしてください。
- イ. 装置に定められた目的以外には使用しないでください。
- ウ. 本品は凍結を避け、貯法に従って保存してください。凍結させた試薬では、品質が変化して正しい結果が得られないことがありますので、使用しないでください。
- エ. 使用期限が切れた試薬は使用しないでください。
- オ. 機器の使用温度で使用してください。
- *（3）廃棄上の注意
- 本製品自体は HIV、HBV、HCV 等の感染性のものを含みません。排出の際は、多量の水に希釈して排出してください。
- （4）その他
- 安全性に関する詳細は、安全データシート（SDS）をご覧ください。

【保管方法・有効期間】

- *（1）保管温度 2-8℃（輸送時：35℃以下、7日以内）
（2）使用期限 ラベルに記載

【包装単位】

コード No.	品名	包装
J11529	電解質洗浄液2	25 mL×1（点眼瓶）

【問合せ先】

株式会社 常光 医療機器開発部
住所等は次の製造販売業者と同じ。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- * 製造販売業者 株式会社 常光
住所 神奈川県川崎市高津区宇奈根731-1
連絡先 TEL 044-811-9211（代表）
FAX 044-811-9249
製造業者 株式会社 常光 菊川工場

機器の取扱説明書を必ずご参照下さい。