

\* この使用説明書をよく読んでから使用してください。

\*\* 2021年01月(第6版)

\* 2020年10月(第5版)

## 透析液用校正液D

### 【一般的な注意】

- ア. 本製品は常光製電解質分析装置専用です。それ以外の目的に使用しないでください。
- イ. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断を行ってください。
- ウ. 本書以外の使用方法については、保証をいたしません。
- エ. 使用する機器の添付文書および取扱説明書をよく読んでから使用してください。

### 【形状・構造等(キットの構成)】

- (1) 専用校正液・組成  
法令対象物質は含まれておりません。

### \*\* (2) 専用校正液・表示値

化学名	含有量		
ナトリウム・イオン	140.0	±0.8	mmol/L
カリウム・イオン	2.00	±0.06	mmol/L
クロライド・イオン	110.0	±0.8	mmol/L

### \*\* 【使用目的】

常光製電解質分析装置において、透析液をより正確に測定する「透析モード」の校正液として使用します。

### 【測定原理】

校正液1および校正液2の2点校正により引かれた検量線に対し、透析用校正液Dで1点補正を行い測定値に正確さを持たせます。

### 【用法・容量(操作方法)】

- (1) 試薬の調製法  
試薬を調製する必要はありません。
- (2) 必要な器具・器材・試料等  
常光製電解質分析装置です。
- (3) 測定法  
透析モードにて、透析液用校正液Dを、アンプルから直接装置に吸引させます。  
1回の使用量は約0.3～2.0mLです。  
※ 詳細は、装置付属の取扱説明書を参照してください。

### 【性能】

- (1) 性能  
ア. 正確性  
本品は、校正用の基準物質、透析液測定用常用参照標準物質(JCCRM 300)を基準にすることにより、正確さを担保しております。

### 【使用上又は取扱上の注意】

- (1) 取り扱い上(危険防止)の注意  
ア. 使用時、装置内に試料又は試薬をこぼさないようにしてください。  
イ. 取扱い後は、手洗いを十分に行ってください。  
ウ. 試薬が目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗い流し、医師の手当を受けください。
- (2) 使用上の注意  
ア. 透析用校正液は、濃縮やpH変動を抑えるために1回分の使用量をアンプルに封入しています。開封したアンプルは、速やかに使用し、必ずその都度使い捨てにしてください。  
イ. 本校正液Dは、表示濃度における1点補正であるため、希釈済みB液など極端に濃度が異なるもの(Na:30mmol/L)に関しましては、正確さを保証致しかねます。  
ウ. 透析用校正による補正值は、電源を切っても記憶しておりますが、安定したデータを維持するために、2週間に1回程度の間隔で校正を行ってください。  
エ. 本品の有効期限はアンプルラベルに記載してあります。

- オ. 装置の操作方法につきましては、各装置の取扱説明書をご参照ください。  
本品は凍結を避け、貯法に従って保存してください。凍結させた試薬では、品質が変化して正しい結果が得られない場合がありますので、使用しないでください。
- カ. 使用期限が切れた試薬は使用しないでください。また、試薬を注ぎ足さないでください。

### (3) 廃棄上の注意

- ア. 本製品自体はHIV、HBV、HCV等の感染性のものを含みませんが、【形状・構造等(キットの構成)】に記載された内容に留意し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規程に従って処理してください。

### \* (4) その他

- ア. 安全性に関する詳細は、安全データシート(SDS)を参照してください。

### 【貯蔵方法・有効期間】

- (1) 貯蔵方法 室温保存
- (2) 使用期限 アンプルラベルに記載

### 【包装単位】

コード No.	品名	包装
J10014	透析液用校正液D	2.5 mL×20
J10039	透析液用校正液D(10入)	2.5 mL×10

### \*\* 【問合せ先】

株式会社 常光 医療機器開発部  
〒213-8588 神奈川県川崎市高津区宇奈根 731-1  
TEL 044-811-9211 (代表)  
FAX 044-811-9249

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 株式会社 常光  
住所 神奈川県川崎市高津区宇奈根 731-1  
連絡先 044-811-9211 (代表)  
製造業者 株式会社 常光 菊川工場

### \*\* 【関連商品】

コード No.	品名	包装
J10040	透析液校正セット	B: 2.5 mL×10
		D: 2.5 mL×10
J10042	透析液校正セットA&D	A: 2.5 mL×10
		D: 2.5 mL×10

機器の取扱説明書を必ずご参照ください。