

チップクリーン 取扱説明書

2025/06

【製品の概要】

本製品は、電気泳動装置の塗布チップ洗浄を目的として設計された、酵素系洗浄剤です。
蛋白分解酵素に加え、非イオン界面活性剤と除菌剤を配合していますので、蛋白・脂質等の汚れに強い洗浄効果を発揮します。

【貯法】

冷蔵庫で保管してください。

【使用期限】

ボトル上に記載されています。

【使用方法】

- チップクリーンは、トレイに適量を注入してご利用下さい。
- 浸透時間、水洗時間、乾燥時間を、装置上で適切に設定してください。
- 使用後は、本剤がトレイ内に残らないように、すぐに流水で十分に洗い流してください。

装置の操作や設定の方法が不明な場合は、弊社サービスへお問合せください。

使用トレイ	機種	形状	注入量	浸透*1	水洗*2	乾燥*3
洗浄用トレイ	CTE-700・780	170mm 用	1.5mL	90sec.	300sec.	270sec.
	CTE-1800	235mm 用	2.5mL			
検体用トレイ (血清皿)	CTE-880	20 検体用	30 μ L $\times$ 20			
	CTE-2800	20 検体用	50 μ L $\times$ 20			
		30 検体用	30 μ L $\times$ 30			
	CTE-9800	30 検体用	30 μ L $\times$ 30			
		32 検体用	30 μ L $\times$ 30			
		40 検体用	25 μ L $\times$ 40			

*1 チップ洗剤浸透時間 *2 チップ水洗浄時間 *3 チップ乾燥時間

【注意】

- 必ず、冷蔵庫で保管してください。
- 誤って、飲み込んだり目に入ることがないように、注意してください。
- 万が一、飲み込んだ場合は直ちに大量の水を飲み、専門医の処置を受けてください。
- 万が一、目に入った場合は直ちに水ですすぎ、専門医の処置を受けてください。
- 他の洗浄剤と、混合しないでください。
- トレイ上で乾燥させてしまった場合は洗浄が難しくなりますので、使用後はすぐに流水で十分に洗い流してください。
- 乾燥させてしまった場合は、一晩以上水につけてから十分にすすぎ、本剤を洗い流してください。
- 塗布チップが古くなると、検体や洗浄剤が残る場合があります。
洗浄剤が検体に混入すると、蛋白分画のパターンに影響を与えますので注意してください。
分画パターンへの影響として α 1、 α 2 分画の減少、および、 γ 分画より陰極側のバンドの出現が、確認されています。